



El nuevo Corega Max Fijación + Confort es un adhesivo para prótesis dentales parciales y completas sin sabor, que proporciona una doble acción: fijación y comodidad superior*.

¡Tan cómodo que olvidarás que llevas prótesis!

Corega Max Fijación + Confort, Crema Fijadora para prótesis dentales Sin Sabor, para Fijación y Comodidad

Esta crema fijadora para prótesis dentales proporciona una fijación de larga duración y está diseñada para mantener la prótesis en su lugar todo el día. Además, proporciona un confort superior* gracias a su fórmula única**, que se activa al contacto con la saliva y forma una suave capa de amortiguación que ayuda a reducir la presión que ejerce la prótesis.

Este fijador de prótesis dentales es fácil de usar gracias a su boquilla de precisión, que ayuda a aplicar de forma exacta la cantidad correcta de producto.

No contiene zinc, colorantes ni sabores artificiales. Está fabricado a partir de energía renovable*** y el cartón es reciclado y reciclable.

MODO DE USO

Aplique una pequeña cantidad la primera vez. Aplique más si es necesario. Aplicar demasiado adhesivo puede hacer que el producto rebosa la prótesis. Aplique menos la próxima vez si esto ocurre. Pueden ser necesarios varios intentos hasta encontrar la cantidad adecuada para su prótesis. Aplique una vez al día para una fijación segura. Si necesita aplicar más de una vez al día, consulte a su dentista.



APLICACIÓN

1. Limpie y seque su prótesis dental.
2. Aplique el producto en tiras continuas, como muestra el diagrama del etiquetado, no demasiado cerca de los bordes de la prótesis dental. Prótesis superior: Aplique el producto en una tira larga y continua. Aplique dos tiras cortas en el centro de la prótesis dental. Prótesis inferior: Aplique el producto en una tira larga y continua. Prótesis parcial: Aplique dos tiras cortas.
3. Enjuáguese la boca con agua antes de colocar la prótesis.
4. Ajuste la prótesis en su lugar, presiónela firmemente y muerda durante unos segundos para asegurar la fijación.

PARA RETIRAR LA PRÓTESIS

1. Enjuáguese la boca con agua.
2. Lentamente retire su prótesis con un suave movimiento de balanceo.
3. Elimine los restos de adhesivo de la prótesis y la boca con un cepillo suave y agua templada.
4. Utilice los limpiadores Corega para limpiar su prótesis dental en profundidad y aclárela bien con agua.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. Algunas personas pueden ser sensibles o alérgicas a este producto. Si experimenta alguna reacción alérgica o molestia, deje de utilizar el producto inmediatamente. Otros efectos secundarios como irritaciones orales y síntomas gastrointestinales (por ejemplo, náuseas) pueden ocurrir. Puede suceder que se traguen pequeñas cantidades de producto cuando se utiliza de la manera indicada. Esto no es dañino. Una prótesis mal ajustada puede afectar a su salud. Visite a su dentista con regularidad para comprobar el ajuste de su prótesis. Para evitar que se obstruya la boquilla, mantenga el tapón y la boquilla secos. Cierre la tapa después de su uso.

* vs no usar fijador

** dentro de la gama Corega

*** Producto final fabricado y empaquetado utilizando electricidad renovable.

Los productos Corega Cumplen con la normativa vigente de productos sanitarios